

## THE HOLMAN OMEGA-3 TEST(ホルマンオメガ-3 検査) 検体作成手順

検査実施前には8時間絶食することが勧められます。

検査を開始する前に、以下の説明を良くお読みください。

### ステップ 1. 検査キット内容の確認

- DBS 血液塗布カード ..... 1 枚  
四つの点線円があるカード状のものです。
- OMEGA 3 TEST と書かれている小さな封筒 ..... 1 枚
- 検体作成手順(本用紙) ..... 1 部
- 検査申込書(Subject Testing Card) ..... 1 枚
- 検査申込書記入例 ..... 1 枚

こちらの記入例はラボへの発送時に同梱頂かないようお願いいたします。

(以下手順中に出てまいりますランセット、アルコール綿、絆創膏及び滅菌ガーゼは同梱ではございません、各クリニック様にてご用意いただいております、ご了承ください。)

※ 検査キットには使用期限がございます。キットの入っております封筒の裏面に EXP DATE として記載がございます(「月/日/年」として記載)。こちらの使用期限内にラボにて分析可能となりますようお願いいたします。

### その他、キットと別に

- 検体発送用封筒(厚紙の白色封筒) ..... 1 枚
- 検体発送用 EMS 送り状 ..... 1 枚
- 検体発送用 Commercial Invoice 及び Sample Producer/Shipper Declaration ..... 1 部

(こちらは検体と共に封筒には同梱頂かず、検体発送時に日本郵便に 1 部(3 枚)提出頂くものとなります。検体発送時 Commercial Invoice には一番下の Date 欄に発送日の日付、Sample Producer/Shipper Declaration には担当医の署名と発送日の日付の記入が必要です。)

キットの中身が不足している場合はデトックスまでご連絡下さい。

株式会社デトックス(Detox Co., Ltd.)

Tel: 03-5876-4511, Fax: 03-3222-5770, Email: askkensa@detox.jp

### ステップ 2. 患者個人情報の入力

- DBS 血液塗布カードに記載されているリリース情報(Release Form)への同意を読んで署名し、日付を記入してください(記載内容の日本語訳が本手順 3 ページ目にございます)。
- DBS 血液塗布カードの裏面に患者個人情報(Customer Information)を全て英語表記にて記入してください。

## THE HOLMAN OMEGA-3 TEST(ホルマンオメガ-3 検査) 検体作成手順

### ステップ 3. 手の洗淨

1. 温かい水道水で手を洗います。
2. 採血する指先を選びます。その指先を同梱のアルコール綿で拭いてください。
3. その後、乾燥させます。

### ステップ 4. 指先に血流を集める

採血する指のある手を 15~20 秒つり下げて、前後に 5~6 回振り、指先に血流を集めます。

### ステップ 5. 指先にランセットを刺す

注意事項: 指の腹でなく脇に刺すと痛みが少ないです。

1. クリアキャップを外します。
2. 手のひらを開いて、ランセットを指先に置きます。
3. ランセットが指先を刺すようにランセットを押し下げます。
4. アルコール綿で、最初に流れ出た血液を拭きます。
5. 血液の滴が出来るように指先をぎゅっと押します。


(ランセットの針は一回のみ使用が可能で、操作を繰り返さないでください。尚、ランセットは国内のクリニックから入手したもののみをご使用ください。基本的にクリニックにて採血して頂くのが簡単です。)

### ステップ 6. 検体作成

1. 適切に操作すれば、血液滴が指先にたまっています。
2. 大きめの血液滴を DBS 血液塗布カードのそれぞれの円の中に塗布します。
3. 血液滴が採取できない場合は、アルコール綿でふいてから血液を押し出します。
4. 少なくとも 3 つの円に血液を塗布下さい。出来れば 4 つ全ての円に血液を塗布下さい。

分析可能な検体の例

**CORRECT**

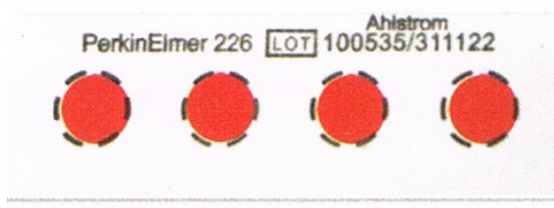

分析がかなわない検体の例

**INCORRECT**

